

Hygienischer Dosierspenderwechsel

Dosierspender nach maximal 3 Wechseln entsorgen.



1 Korrekte Händereinigung oder Händedesinfektion.



2 Arbeitsfläche reinigen.



3 Material bereitstellen.



4 Bei neuer Flasche Deckel abschrauben und mit Öffnung nach oben neben Flasche legen.



5 Dosierspender von gebrauchter Flasche abschrauben...



6 ...und direkt auf neue Flasche aufschrauben.



7 Deckel der neuen Flasche auf gebrauchte Flasche aufschrauben.



8 Dosierspender mit zweimaliger Pumpbewegung «reinigen».



9 Gebrauchte Flasche auf den Kopf stellen, restlichen Inhalt aufbrauchen.

